


Instalación de la actualización del Software


Ambu se esfuerza por optimizar el equipo de entrenamiento. Los productos se encuentran en un continuo proceso de mejora, gracias al feedback de los clientes. Los dispositivos de entrenamiento Ambu se actualizan continuamente con las nuevas versiones disponibles. En esta guía rápida se explica cómo descargar una actualización del Software.

Nota: Es recomendable guardar la base de datos del Maniquí antes de empezar la actualización del Software. (Ver más en la página 2 de la guía).

1. Abra el menú de configuración

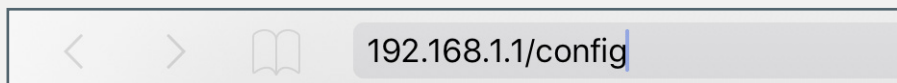


Encienda el maniquí y conéctelo con su teléfono móvil. Abra su navegador e ingrese la dirección web <http://Ambu.login/config> o **192.168.1.1/config** en el campo del navegador, para poder acceder y conectarse a el menú de configuración del maniquí.

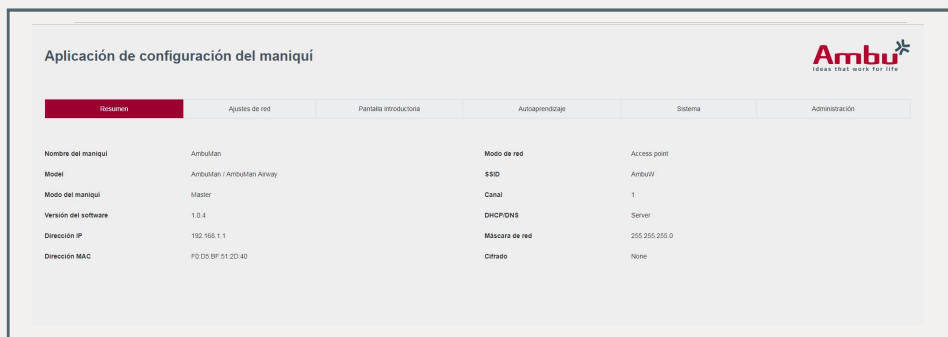


Haga clic en la pestaña "Administración" en el menú de configuración.

2. Descarga de la actualización del software

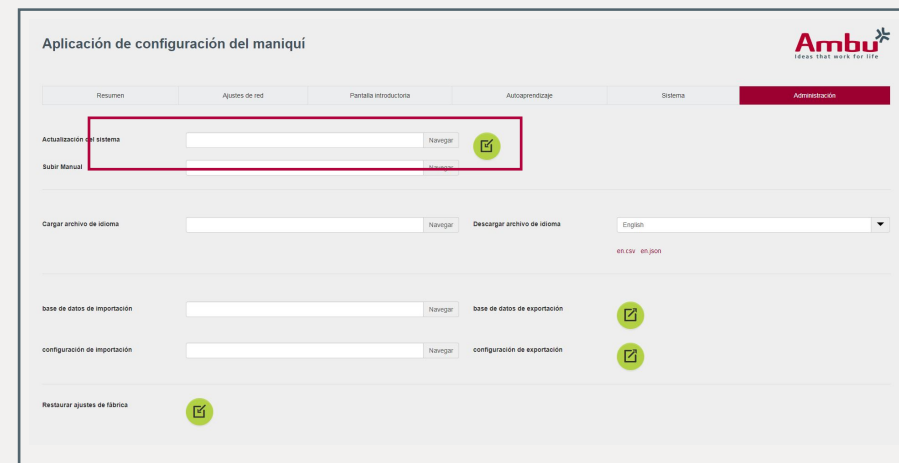

Para cargar una nueva actualización del software en el dispositivo, abra el archivo correspondiente en "Actualización del sistema". Al hacer clic en "Buscar" en la pestaña "Actualización del sistema", podrá buscar el archivo deseado.

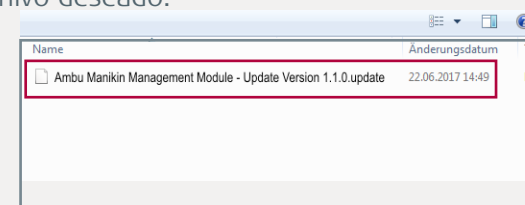

Diríjase a su ubicación y seleccione la actualización del software. Ábrala (en este caso, Ambu Manikin Management Module-Update Version 1.1.0.update-Software-Update V1.1.0.).

Nota: Tenga a mano el archivo de actualización en una ubicación de fácil acceso.

Continuación: Carga de la actualización del software

Overview Network settings Introduction screen Self-training Language System Administration

System update Browse

Upload manual Browse

El archivo del software se transfiere automáticamente al campo apropiado. Para completar la actualización, haga click en el botón "Importar".

3. Reinicio del maniquí

Aplicación de configuración del maniquí

Resumen Ajustes de red Pantalla introductoria Autoaprendizaje Sistema Administración

Actualización del sistema Navegar

Subir Manual Navegar

Cargar archivo de idioma Navegar Descargar archivo de idioma English

en csv en json

El maniquí se apaga automáticamente y se reinicia para instalar todas las actualizaciones. Después de haber comenzado, vuelva a conectarse como se describe en la sección 1.

4. Revisión de la configuración

Aplicación de configuración del maniquí

Resumen Ajustes de red Pantalla introductoria Autoaprendizaje Sistema Administración

Nombre del maniquí	AmbuMan	Modo de red	Access point
Model	AmbuMan / AmbuMan Airway	SSID	AmbuM
Modo del maniquí	Master	Canal	1
Versión del software	1.0.4	DHCP/DNS	Server
Dirección IP	192.168.1.1	Máscara de red	255.255.255.0
Dirección MAC	FD:D5:BF:51:2D:40	Cifrado	None

Tras re-conectar el maniquí, el dispositivo se puede usar como de costumbre. Puede buscar la versión del software en el dispositivo en la sección de descripción general del menú de configuración.

Ingrese **http://Ambu.login/config** o **192.168.1.1/config** en el campo de dirección del navegador.

En la pestaña Descripción general en "Versión del software", encontrará la Versión actual (en este caso: 1.0.4).

NOTA:

Actualización del sistema Navegar

Subir Manual Navegar

Antes de comenzar la actualización del software, guarde su base de datos en su disco local. Esto garantiza que los datos modificados estén completamente disponibles incluso después de la actualización del software. Abra la pestaña "Administración" en el menú de configuración. Haga clic en el botón Exportar base de datos para exportarla de forma completa.